

Baggrund:

Når man tager et digitalt billede, eksempelvis af en tunge, sker der mange ting i overførslen af den virkelige verden til den digitale.

Billedformatet som sædvanligvis anvendes (JPEG) og den anvendte kompresion giver en ændring af farverne, og originalfarven kan aldrig fuldt genskabes. Desuden viser forskellige programmer gerne det samme billede i let forskellige nuancer.

De forskellige kameraers indbyggede software er vidt forskellige, og de forskellige farvebalancer er vidt forskelligt implementeret, blitx eller ej har også på den korte afstand stor betydning.

De skærme, hvor billedet vises, er meget forskellige, og indstillingerne varierer fra bruger til bruger. Og skulle man endelig formaste sig til at udskrive billedet på papir, har man føjet yderligere en variabel til listen over mulige fejlbehæftende faktorer.


Der er altså et behov for en metode, som gør det muligt på trods af teknologien at kunne finde tilbage til den virkelighed, hvor billedet blev taget.

Løsningen er nærliggende: en uforanderlig standard, som relaterer sig til det fotograferede objekt indfotograferes sammen med objektet. Det vil så, næsten uanset teknologiens ”angreb”, være muligt ved at se standarden sammen med objektet, at fastholde hvorledes objektet så ud på billedtidspunktet.

DorisPladen er denne uforanderlige standard, og dermed svaret på problemet. Med sine ni grundlæggende farver fra tungediagnostikken er man nu i stand til at fastholde en standard i et tungebillede, og man vil altid være i stand til at genopdage tungens oprindelige farver.

DorisPladen

Find tilbage til de virkelige tungefarver

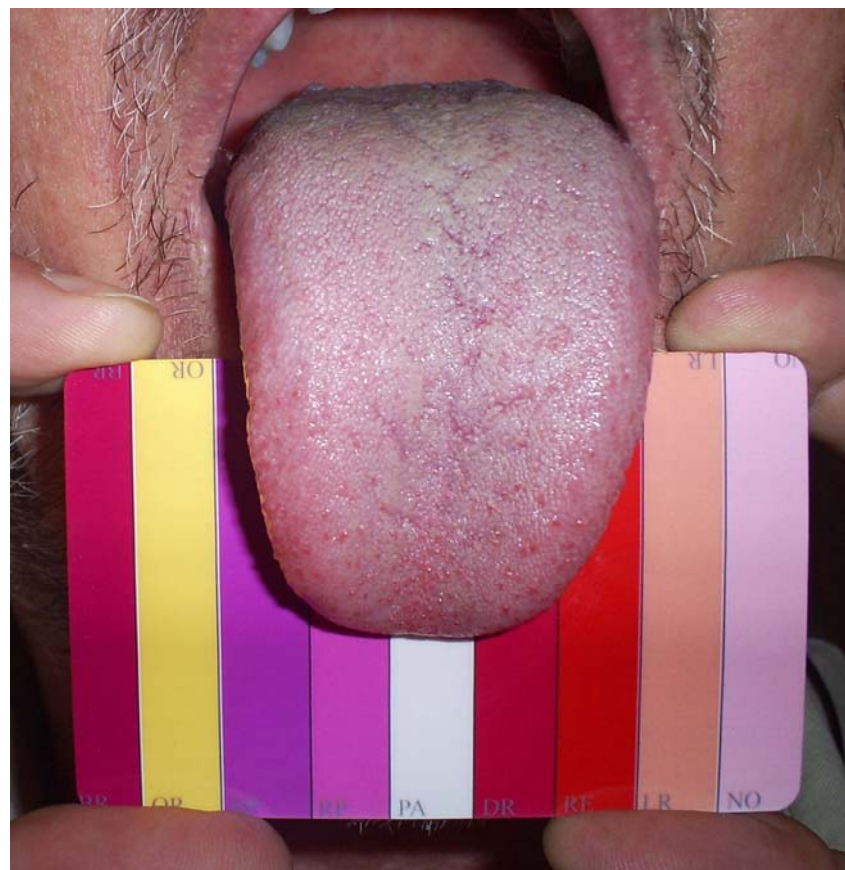

Beskrivelse og anvendelse 2011-03-17



www.DorisPlate.com

DorisPladen er påtrykt en standardiseret farvepalette, tilpasset tungediagnostik.
 Farverne på forsiden er forsynet med en forkortelse af det engelske navn, og på bagsiden er farvens engelske navn skrevet fuldt ud.
 Farvernes danske betegnelse er

Forkortelse	Farve navn
NO	Normal
LR	Lys rød
RE	Rød
DR	Dyb rød
PA	Bleg
RP	Purpur, rødlig
BP	Purpur, blålig
OR	Orange
BR	Sort/rød

Fotografering af tungen:

Ved fotografering er det vigtigt, at DorisPladen anbringes, så en del af alle ”striberne” er med på billedet.

Det gælder for både over- og underside at tungen skal rækkes ud i en naturlig og afslappet holdning. Man skal kunne se hele tungens overflade fra spids til bageste område. Hvis det ikke kan lade sig gøre på et billede, må man aflæse tungen i flere omgange.

Det bør ikke vare længere end 10-15 sekunder hver gang. Hvis tungen strækkes for meget – og for længe – risikerer man, at tungemusklens overanstrengelse og at tungen bliver mere rød eller mørk.

Pladen afsprittes før og efter brug.

